



Imbrasul
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

BOLSAS DE COLOSTOMIA COM FLANGE
MASTER WIN®



MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.IMBRASUL.COM.BR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CUIDADOS

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes:

1)assegurar-se de que a pele **periestoma** esteja limpa, seca e livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possa prejudicar a aderência. limpar a área com água e sabão e secar completamente, o suporte adesivo flexível só adere à pele seca.

2)não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa.

3)não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. contudo, após o contato com a água o suporte adesivo e a parte de trás da bolsa devem ser secos com uma toalha.

4)pequenas porções da barreira protetora podem permanecer na pele durante o processo de troca da bolsa. não é necessário remover completamente todo o resíduo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO

- 1) Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- 2) Recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando o guia de medidas impresso no papel aderente.

APLICAÇÃO

- 1) Remover a película de proteção do adesivo da placa.
- 2) Pressionar a placa sobre a abertura do estoma, com as duas mãos.
- 3) Pressionar de baixo para cima , para deixá-la completamente grudada a pele.
- 4) Retirar o restante do papel que protege as bordas laterais e alisá-las sobre a pele. Um ajuste preciso entre a base e o estoma é importante para reduzir o risco de problemas de vazamento e de pele.
- 5) Após fixar a placa, encaixe a bolsa sobre a flange da placa, pressionando os encaixes com os dedos de baixo para cima.
- 6) A bolsa vai estar fixada com segurança na placa quando fizer um som de clique.
- 7) Puxe a bolsa para ter certeza de que esta fixada.
- 8) A placa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FIXAÇÃO DO CLIPE DE FECHAMENTO

- 1) segurar o clipe aberto, pela dobradiça, com a mão direita.
- 2) dobrar a extremidade aberta da bolsa sobre a "lâmina" inferior do clipe, somente uma vez, manter no lugar.
- 3) pressionar firmemente a lâmina erguida do clipe (principalmente no centro), até ouvir um estalo indicando que as lâminas se fecharam com segurança.

ABERTURA DO CLIPE DE FECHAMENTO

Usando ambas as mãos, separar a "lâmina" superior do clipe, da parte inferior.

REMOÇÃO

- 1) Remova a bolsa puxando o guia de remoção no flange.
- 2) Para remover a placa, pressione a pele com uma mão e com a outra retire-a da pele delicadamente. Se isso for difícil, coloque um pouco de água morna e espere alguns minutos. Então retire a placa.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As bolsas de colostomia **Master Win®** devem ser armazenadas em local seco com temperatura ambiente. não devem ser armazenadas em ambientes com temperatura superior a 40 ° C, úmido ou geladeira.

OBSERVAÇÕES

Não utilizar desinfetante, sabão ou detergente para limpar a pele ao redor do estoma. Não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa. Não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.

Tricomizar a área localizada em torno do estoma, ou a bolsa de colostomia para que haja boa adesão à pele e para que a ocorrência de foliculite seja evitada. Limpar o estoma de dentro para fora somente com água morna.

Produto não estéril

**BOLSAS DE COLOSTOMIA COM
FLANGE
MASTER WIN®**



GERAL

(53) 3025.4445 / (53) 3025.4451
imbrasul@imbrasul.com.br

REGIÃO SUL e SUDESTE

(53) 98428.6552
vendas3@imbrasul.com.br

DEMAIS REGIÕES

(53) 99166.7706
vendas2@imbrasul.com.br